


Měkké kontaktní čočky v pufrovaném fyziologickém roztoku.

Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy umyjte a osušte ruce.

Sterilní bariérou pro kontaktní čočky je neporušené těsnění blistru.

 Nepoužívejte, pokud je porušen sterilní bariérový systém výrobku nebo jeho obal.

Kontaktní čočky slouží pouze pro vlastní použití.

NASAZOVÁNÍ ČOČEK

1. Přesvědčte se, že čočka není převrácená naruby. Čočku si položte na ukazováček a zkontrolujte správný tvar. (Obr. 1 & 2)
2. Ukazováčkem druhé ruky si přidrže horní víčko. Prostředníkem ruky na které máte čočku si přidrže spodní víčko. Přiložte čočku na oko. (Obr. 3) Zopakujte tento postup i u druhého oka.

VYJÍMÁNÍ ČOČEK

Podívejte se vzhůru a prostředníky obou rukou oddělte obě víčka. Čočku si lehce posuňte po oku dolů na bělmo, bříšky ukazováčku a palce ji stiskněte a vyjměte z oka. Zopakujte tento postup i u druhého oka.

DEZINFEKCE A UCHOVÁVÁNÍ ČOČEK

Čočky, které lze použít vícekrát (jeden pacient, více použití), čistěte a dezinfikujte přesně podle pokynů uvedených v příbalovém letáku roztoku nebo podle instrukcí vašeho kontaktologa (např. oftalmologa, optometrika nebo optika). V zájmu dodržení správné péče o pouzdro na kontaktní čočky postupujte podle pokynů na lahvičce s roztokem.

Poznámka: Jednodenní čočky jsou určeny výhradně k jednorázovému použití a poté je třeba je vyhodit. Pokud jsou tedy vaše čočky určeny k jednorázovému použití, NIKDY JE NEPOUŽÍVEJTE více než jednou. Jednodenní čočky nejsou určeny k čistění nebo dezinfekci, ani k více než jednorázovému použití. Opakované použití jednodenních čoček je může poškodit a tím zvýšit riziko oční infekce a dalších problémů způsobených nesprávnou péčí a zacházením s kontaktními čočkami.

DOJDE-LI K VYSCHNUTÍ ČOČEK

Zvlhčete je opět dezinfekčním a čistícím nebo oplachovacím roztokem a přečistěte podle bodu Dezinfekce a uchovávání čoček.

Skupina materiálu pro kontaktní čočky:	Indikace	Zamýšlení uživatelé:
comfilcon A ¹ , fanfilcon A ² , methafilcon A ³ , ocufilcon B ⁴ , ocufilcon D ^{3,4} , omafilcon A ⁴ , omafilcon B ² , riofilcon A ⁴ , somofilcon A ^{2,4} , stenfilcon A ⁴	Pro korekci ametropie.	Pro uživatele s ametropií, se zdravými očima. Bez věkového omezení; o vhodnosti musí rozhodnout kontaktolog.
omafilcon A pro korekci krátkozrakosti ⁴	Pro korekci krátkozrakosti.	Pro děti ve věku od 6 do 18 let, které jsou považovány za vhodného uživatele příslušně kvalifikovaným odborným zdravotnickým / očním lékařem.

¹ Pro (nepřetržitě) dlouhodobé nošení; ²pro každodenní nošení; ³pro dlouhodobé nošení; ⁴pro denní jednorázové nošení / použití.

Symbol na štítku označuje, že čočky jsou určeny ke každodennímu jednorázovému nošení a nejsou určeny k opakovanému použití. Pokud symbol není přítomen, je čočka určena pro jiný režim nošení.

UPOZORNĚNÍ

1. Pro všechny typy čoček vám váš kontaktolog doporučí režim výběru na nošení, čištění a výměnu čoček. Režim neměňte. Při jakýchkoli pochybnostech se obraťte na svého kontaktologa.
2. Kontaktní čočky jsou zdravotnické prostředky a jejich výběr pro vaše oči musí vždy provádět kontaktolog.
3. Pokud používáte vícedenní čočky, pak je poslední večer před výměnou za nové vyjměte a vyhodte. Následující den si nasadte nové čočky.
4. Čočky používané více než jedenkrát po vyjmutí vždy vyčistěte a vydezinfikujte podle pokynů.
5. Pokud vám oči zarudnou, jsou podrážděné, nebo pokud pociťujete nějaké bolesti očí či neočekávané změny kvality vidění, pak čočky okamžitě vyjměte a poraďte se se svým kontaktologem.
6. Zabraňte znečištění čoček make-upem, aerosolovými spreji a nenoste je v blízkosti škodlivých výparů.
7. Čočky poškozené, znečištěné nebo poškrábané ihned vyměňte.
8. Pozor na dlouhé nehty, za nimiž se skrývají bakterie a které by mohly poškodit oko nebo čočku. Poškrábané oko je náchylné k infekcím.
9. Ukládejte své čočky mimo dosah dětí, které je nepoužívají.
10. Při vodních sportech noste kontaktní čočky pouze s vodotěsnými plaveckými brýlemi.
11. V případě kontaktu s nesterilní vodou (např. z vodovodu, lahve, vany, bazénu nebo z vodních sportů) se zvyšuje riziko mikrobiální infekce.
12. Roztoky doporučené vašim kontaktologem nikdy neměňte.
13. Nikdy neměňte typ nebo parametry čoček bez konzultace s očním lékařem.

VAROVÁNÍ

1. **NESPĚTE** s čočkami, pokud vám to nedoporučil váš kontaktolog.
2. **NEPOUŽÍVEJTE** čočky déle, než vám bylo doporučeno kontaktologem.
3. **NEPOUŽÍVEJTE** na čištění čoček prostředky určené pro domácnost (např. dezinfekční prostředky).
4. **NENOSTE** kontaktní čočky, používáte-li oční kapky (pokud takový postup nedoporučí oční lékař).
5. **NEZVLHČUJTE** čočky slinami.
6. **NEOPLACHUJTE** kontaktní čočky ani pouzdro vodou z vodovodu.

Kontraindikace (důvody, proč přípravek nepoužívat)

Kontaktní čočky **nepoužívejte**, nastane-li některý z následujících stavů.

- Akutní a subakutní zánět nebo infekce přední komory oka.
- Jakékoli oční onemocnění, poranění nebo abnormalita, která ovlivňuje rohovku, spojivky nebo víčka.
- Hypestezie rohovky (snížená citlivost rohovky), není-li afakická (je přítomna přirozená oční čočka).
- Závažná nedostatečnost slzné sekrece (suché oči).
- Jakékoli systémové onemocnění, které může mít vliv na oko nebo se zhoršovat nošením kontaktních čoček.
- Alergické reakce očních povrchů nebo adnex (oční víčka a řasy), které mohou být vyvolány nebo zhoršeny nošením kontaktních čoček nebo použitím roztoků pro kontaktní čočky.
- Jakákoli aktivní rohovková infekce (bakteriální, houbová, protozoální nebo virová).
- V případě zčervenání nebo podráždění očí.
- Použití kontraindikovaných léků, včetně očních léků.

Nežádoucí reakce (nežádoucí vedlejší účinky)

Při nošení kontaktních čoček můžete zaznamenat následující příznaky:

- Menší pohodlí při nošení čočky nebo pocit něčeho v oku
- Pálení, škrábání, svědění, suchost v očích

- Vodnaté oči a/nebo neobvyklý výtok z očí
- Citlivost na světlo
- Otok nebo zánět očí (oteklé víčko, zarudnutí očí)
- Dočasné zhoršení zraku

Postup v případě těchto příznaků: Je nutno okamžitě sejmout čočky. Pokud příznaky přetrvávají, může jít o vážné zhoršení stavu očí. Neprodleně vyhledejte pomoc svého kontaktologa, aby mohly být odhaleny a léčeny potenciální zdravotní problémy a zabráněno vážnému poškození očí, je-li to nutné.

Ke zdravotním problémům souvisejícím s těmito příznaky patří: abraze rohovky, edém rohovky (otok), infiltrativní keratitida (zánět rohovky), infekce rohovky nebo vřed, neovaskularizace rohovky a papilární konjunktivitida (zánět očního víčka).

Likvidace: se standardním odpadem, podle možností recyklujte.

Jakýkoli závažný incident ve vztahu k výrobku je nutné oznámit výrobcí a příslušnému kompetentnímu orgánu.



CooperVision
 Hamble, SO31 4RF, UK
 0123   www.coopervision.com


MD Medical Device
 

EC REP

CooperVision CL Kft.
 Gorcsev Iván street 7. Building C.
 2360 Gyál, Hungary



STERILE

